





دليل البدء جهاز الوخز OneTouch® Delica® Plus

اجعل كل فحص بدون ألم يُذكر

تحضير جهاز الوخز

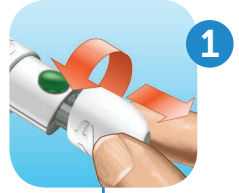

1 انزع غطاء جهاز الوخز

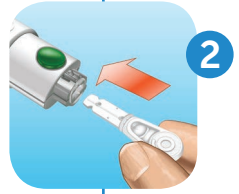

2 أدخل إبرة شك مُعقّمة
في جهاز الوخز وانزع
غطاءه الواقى



3 أعد تركيب غطاء جهاز
الوخز في مكانه



4 اضبط إعداد العمق
اختر الأرقام الأصغر للثقب الأقل
عمقاً؛ واختر الأرقام الأكبر للثقب
الأكثر عمقاً.



5 اضبط وضعية جهاز الوخز
من خلال تحرير الزر مرة أخرى
حتى تسمع صوت طقطقة

الآن يمكنك إجراء الاختبار

إجراء الاختبار وإخراج الإبرة المستعملة

اثقب إصبعك

أمسك جهاز الوخز بإحكام بحيث يكون
مُواجهاً لجانب إصبعك. اضغط على زر
التحرير للثقب.



ضع العينة

ضع العينة باتّباع التعليمات الواردة في
كتيب مالك OneTouch® بخصوص
الوضع السليم للعينة.



أعد غطاء جهاز الوخز إلى مكانه مرة أخرى



قم بتغطية طرف إبرة الشك المكشوف

ضع غطاء حماية إبرة الشك على سطح
صلب وادفع طرف الإبرة باتجاه وجه
القرص المسطح.



أخرج إبرة الشك

أمسك جهاز الوخز بحيث يكون مُتجهاً
لأسفل وادفع المزلاق للأمام حتى تُخرج
إبرة الشك. ادفع الغطاء مرة أخرى في
الجهاز.



أعد تركيب غطاء جهاز الوخز في مكانه

تخلص من إبرة الشك المُستعملة بعناية
بعد كل استخدام لتجنب أي إصابات
نتيجة لملامسة الإبرة بشكل غير مقصود.



نصائح تجعل عمليات فحص السكر في الدم أقل ألماً وتقلل من فرص الإصابة بالعدوى



- ضع جهاز الوخز بحيث يكون مُواجهاً لجانب الجزء العلوي من إصبعك.
- اختر موضع ثقب مختلفاً في كل مرة تجري فيها الاختبار. فقد يؤدي تكرار الثقب في نفس الموضع إلى الإصابة بتقرّح وتصلّب الأنسجة
- لا تُشارك استعمال إبرة الشك أو جهاز الوخز مع أي شخص. فهذه الأدوات مخصصة لاستعمال مريض واحد فقط.

- قبل الاختبار، اغسل يديك وموضع أخذ العينة بماء دافئ وصابون. اشطف هذه المناطق بالماء وجفّفها تماماً، لأن الملوّثات العالقة بالبشرة قد تؤثر على دقة النتائج.
- استعمل إبرة شك مُعقّمة وجديدة في كل مرة تجري فيها الاختبار. لا تستخدم إبرة شك مُستعملة
- اضغط برفق على طرف إصبعك حتى تتكون قطرة دم مستديرة.



استخدم إبرة شك OneTouch® Delica® Plus مُعقّمة وجديدة في كل اختبار من أجل تجربة وخز بدون ألم تقريباً.

قد يؤدي إعادة استعمال إبرة الشك إلى إضعاف أو ثني طرف الإبرة، مما يتسبب في إيذاء البشرة وجرحها ومن ثمّ يشعر الشخص بالألم أشد.

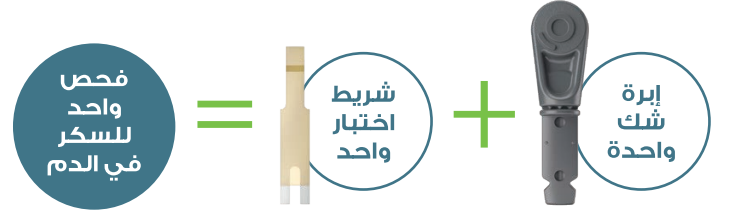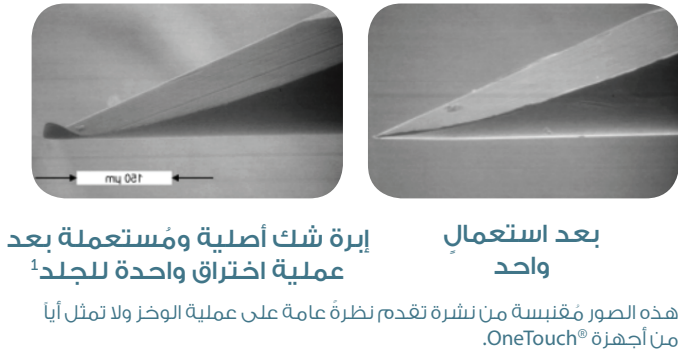

استفسر عن جهاز الوخز OneTouch® Delica® Plus وإبر الوخز قياس 30 غ (الدقيقة) في الصيدلية الأقرب لديك.