

التعرّف على جهاز القياس وان تاتش فيريو رفلكت

اقرأ بعناية كتيب المالك
والنشرات المصاحبة لمكونات
النظام قبل استخدام جهاز
القياس OneTouch Verio
Reflect™ لاختبار نسبة السكر
في دمك.

الجهاز متوفر
باللغة العربية



- | | | | |
|---|---------------------------|----|--|
| 1 | منفذ إدخال شريط الاختبار | 6 | زر الرجوع |
| 2 | أيقونة البلوتوث | 7 | زر لأعلى وزر لأسفل |
| 3 | وحدة القياس (ملغ/ديسيلتر) | 8 | مؤشر ColourSure™ Dynamic Range Indicator |
| 4 | منفذ بيانات USB صغير | 9 | أيقونة مؤشر النطاق |
| 5 | زر الموافقة (OK) | 10 | أيقونات مُتتبع الاختبار |

البدء السريع: إعداد جهاز القياس

شغّل جهاز القياس عن طريق الضغط باستمرار على زر الموافقة (OK) حتى تظهر لك شاشة **مرحباً**. يمكنك أيضاً تشغيل جهاز القياس عن طريق إدخال شريط الاختبار.

إجراء اختياري: يمكنك إعداد جهاز القياس باستخدام تطبيق OneTouch Reveal® App.

اضبط اللغة والوقت والتاريخ عن طريق الضغط على زر **لأعلى وزر لأسفل**، ثم اضغط زر الموافقة (OK) لحفظ اختيارك.

إجراء اختياري: يمكنك أيضاً ضبط حدود النطاق، وهدف الاختبار اليومي، ومتوسط الهدف خلال 90 يوماً* في هذا الحين.

تظهر شاشة **اختتم الإعداد**. للاستخدام الآن.

يمكنك إيقاف تشغيل جهاز القياس بأي من الطرق الثلاثة التالية: (أ) بالضغط باستمرار على زر الموافقة (OK) لعدة ثوانٍ، أو (ب) بإخراج شريط الاختبار من الجهاز، أو (ج) بترك جهاز القياس لمدة دقيقتين.

* احرص على التحدّث إلى اختصاصي الرعاية الصحية المتابع لاحتك بشأن الإعدادات الأنسب لك.

البدء السريع: إجراء اختبار

اغسل يديك بماء دافئ وصابون، ثم جفّفها تماماً.

أدخل شريط اختبار في **منفذ إدخال شريط الاختبار**، على أن يكون الوجه الذهبي من شريط الاختبار وطرفيه القضبان في مواجهتك.


اضبط إعداد عمق **جهاز الوخز**، ثم أمسك الجهاز بإحكام بحيث يكون مواجهاً لجانب إصبعك*.

* احرص دوماً على استخدام إبرة وخرّ مَعقمة وجديدة في كل مرة تجري فيها الاختبار

اضغط على زر **التحرير** ليتم وخز إصبعك. قم بإزالة إبرة الوخز. اضغط برفق على إصبعك لتكوين قطرة دم مستديرة.

أمسك جهاز القياس بزاوية طفيفة، على أن يلامس أحد جانبي شريط الاختبار قطرة الدم بلطف. يسحب شريط الاختبار الدم إلى القناة.

سيطالعك جهاز القياس في الحال إذا كانت نتيجة القياس الحالية أقل من حدود النطاق الخاصة بك أو ضمنها أو تتجاوزها، كما سيُخبرك أيضاً عندما تكون نتيجتك قريبة من الحدود المنخفضة أو المرتفعة لنطاقك المستهدف.

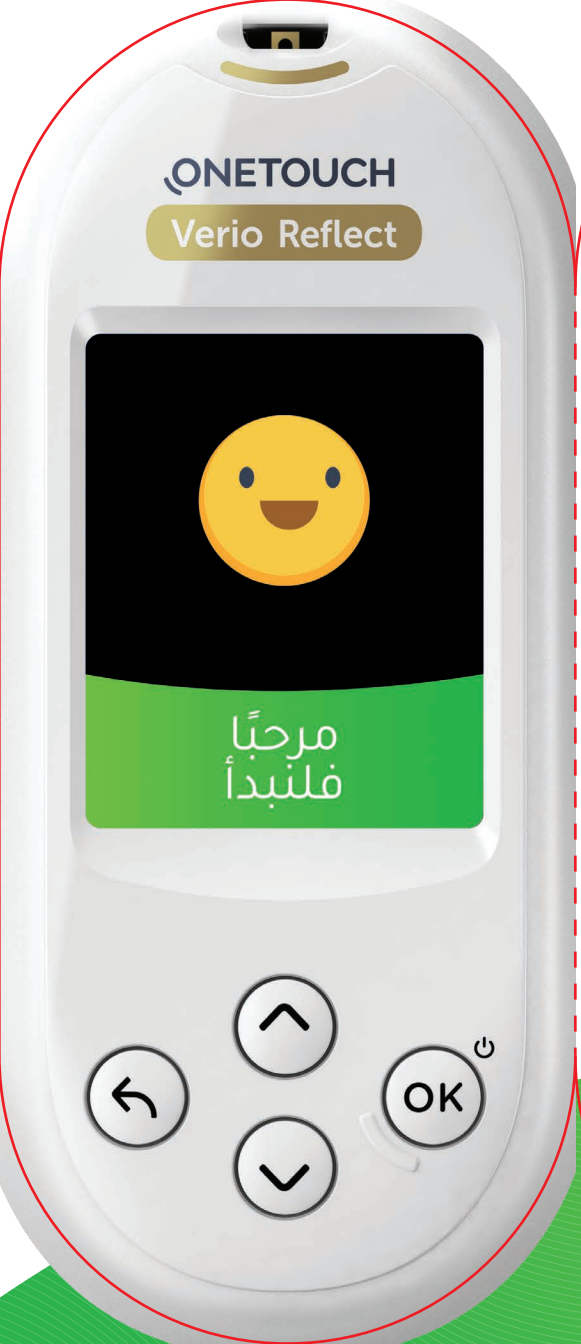

اتصل بالتطبيق لتحصل
على معلومات أكثر



بادر بتنزيل تطبيق OneTouch Reveal® مجاناً:



بعد ذلك تفضّل زيارة موقعنا
OneTouchMEA.com اليوم لتحصل
على نصائح وإرشادات أكثر إفادة.

* Research2Guidance Diabetes App
Market Data Q1-Q4, 2017.

ONETOUCH
Reveal®

يوفر لك تطبيق OneTouch Reveal®
للجوال معلومات أكثر تساعدك على
إدارة مرضك بالسكري.*



تعليمات الإقتران


يجب تشغيل خاصية البلوتوث حتى
تتمكن من إقتران جهاز القياس بالتطبيق.

افتح تطبيق OneTouch Reveal®
للجوال واتبع التعليمات الخاصة بإقتران
جهاز القياس بجهازك اللاسلكي
الموافق.

* أكثر من مجرد استخدام جهاز القياس

Blood Sugar
Mentor™

تظهر رسائل جهاز القياس
بخاصية مراقبة السكر في الدم
(Blood Sugar Mentor™) تلقائياً بعد
عرض نتيجة الاختبار، عندما يكون الوضع
الأساسي قيد الإيقاف.

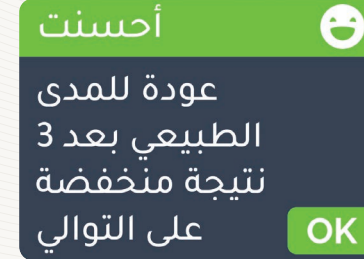

اضغط على زر الموافقة (OK)
لإخفاء الرسائل؛ واضغط على نفس
الزر لعرضها مرة أخرى. قم بتنشيط
خاصية مراقبة السكر في الدم
(Blood Sugar Mentor™) عن طريق
إيقاف الوضع الأساسي من الإعدادات <
الميزات > الوضع الأساسي.

ColourSure™
PLUS

يعرض مؤشر ColourSure™ Dynamic
Range Indicator تلقائياً 1 من 5 نتائج
اختبار ضمن النطاق. وتظهر هذه النتائج
في شكل رموز إيموجي تعبيرية عندما
يكون الوضع الأساسي قيد الإيقاف.



قم بتنشيط رموز الإيموجي التعبيرية
عن طريق إيقاف الوضع الأساسي من
خلال اختيار الإعدادات < الميزات > الوضع
الأساسي. حدد رموز "الإيموجي" التعبيرية
أو "النصوص" في الإعدادات < الميزات >
مؤشر النطاق.

تفضّل زيارة موقعنا
OneTouchMEA.com أو اتصل
بخط خدمة عملاء OneTouch®

www.OneTouchMEA.com

service@lifescanmea.com

اتصل بخط خدمة عملاء OneTouch®
الإمارات: 800 4530
قطر: +974 440 27400، داخلي 7580
الكويت: +965 222 76888
البحرين: +973 177 31415
عمان: +968 248 14501
السعودية: 800 244 0266 (الرقم المجاني)

iOS هي علامة تجارية لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة
وبلدان أخرى. App Store™ هي علامة خدمة لشركة Apple Inc. أما -
Google Play وdroid فهما علامتان تجاريتان لشركة Google Inc. علامة
البلوتوث الكتابية وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة
Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل شركة
LifeScan Scotland Ltd. يتم بموجب ترخيص. أما العلامات التجارية
والأسماء التجارية الأخرى فهي مملوكة لأصحابها المعنيين

© 2021 LifeScan IP Holdings, LLC - CA-VRF-1900170

وانتاتش®